

neodisher SC

- Automatyczne mycie giętkich endoskopów
- Płynny koncentrat



Zastosowanie: Preparat w koncentracji do automatycznego mycia endoskopów giętkich oraz innych wyrobów medycznych w myjniach dezynfektorach Steelco.

Charakterystyka: neodisher S.C. łączy doskonałe właściwości myjące z wysoką kompatybilnością materiałową. Alkaliczny detergent niezawodnie usuwa zaschnięte i sfiksowane pozostałości krwi, osiągając znaczne usunięcie zanieczyszczeń organicznych. neodisher S.C. zawiera wodorotlenek potasu (KOH) i związki powierzchniowo czynne, które zapobiegają ponownemu osadzaniu się rozpuszczonych pozostałości białka.

Roztwór neodisher SC jest kompatybilny ze stałą nierdzewną, narzędziami stalowymi, optycznymi oraz standardowymi plastikowymi. W pierwszej kolejności powinno być sprawdzone anodowane aluminium. Na etapie mycia zalecane jest użycie zdejonizowanej wody.

Instrukcja użycia: Automatyczne mycie giętkich endoskopów: 5 ml/L (0.5%), 5 min., 35°C
Roztwór roboczy preparatu neodisher S.C. należy dokładnie wypłukać wodą (preferowana woda zdejonizowana).

Nie łączyć z innymi produktami.

Przed zmianą produktu należy przepłukać układ dozowania.

Tylko do profesjonalnego użytku.

Parametry techniczne: Gęstość (20°C): 1.1 g/cm³
pH (oznaczone w wodzie zdejonizowanej, 20°C) 5 ml/L: 10.5
Lepkość (koncentrat, 20°C): < 50 mPas

Składniki: Zgodny z Regulacją (EC) Nr 648/2004 dotyczącą detergentów:
< 5 % niejonowych związków powierzchniowo czynnych, 5 – 15 % NTA
oraz: enzymy, konserwanty (fenoksyetanol, metyl-, etyl-, butyl-, propyl-, izopropylparaben)

Znak CE: neodisher SC jest zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/EC, Załącznikiem I, dotyczącą wyrobów medycznych.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, ale nie mroźnym miejscu. Zawsze przechowywać przy zakresie temperatur 0 – 25 °C. Produkt ważny 2 lata pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami.

Producent: Dr. Weigert

Dystrybutor: Steelco, Włochy

Dystrybutor w Polsce: **Medilab Sp. z o.o.**; ul.Niedźwiedzia 60; 15-531 Białystok;
Tel./fax: 85 743 28 97; www.medilab.pl

