

Tabela dozowania tabletek **HAZ-TABS**



	POWIERZCHNIE NIEZANIECZYSZCZONE ORGANICZNIE		POWIERZCHNIE ZANIECZYSZCZONE ORGANICZNIE		PLAMY KRWI, WYDALINY, WYDZIELINY
STĘŻENIE	0,19% 1 000 ppm aktywnego chloru	0,38% 2 000 ppm aktywnego chloru	0,76% 4 000 ppm aktywnego chloru	1,14% 6 000 ppm aktywnego chloru	1,90% 10 000 ppm aktywnego chloru
CZAS	15 min.	15 min.	30 min.	15 min.	15 min.
SPEKTRUM	B, F, V	B, Tbc, F, V	B, Tbc, F, V	B, Tbc, F, V	B, Tbc, F, V
1 tabl.	2,5 l wody	1,25 l wody	625 ml wody		250 ml wody
2 tabl.	5 l wody	2,5 l wody	1,25 l wody		500 ml wody
4 tabl.	10 l wody	5 l wody	2,5 l wody		1 l wody
6 tabl.	15 l wody	7,5 l wody	3,75 l wody	2,5 l wody	1,5 l wody
8 tabl.	20 l wody	10 l wody	5 l wody		2 l wody
10 tabl.	25 l wody	12,5 l wody	6,25 l wody		2,5 l wody
12 tabl.	30 l wody	15 l wody	7,5 l wody	5 l wody	3 l wody