



Stworzony aby sprostać Twoim wyzwaniom
Dräger Oxylog® VE300

Nie szczędziliśmy wysiłków – aby ułatwić Twoją pracę



GOTOWY NA KAŻDE WYZWANIE

Kiedy to naprawdę ma znaczenie, powinieneś skupić się wyłącznie na najważniejszym – Twoim pacjencie. Dlatego zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy całkowicie nowy przenośny respirator ratunkowy Dräger Oxylog® VE300, który jest ergonomiczny, prosty w użyciu i solidnie wykonany.

Oxylog VE300 jest urządzeniem o wielu zaletach. Jedną z nich jest bardzo niska masa. Ten łatwy w obsłudze, ważący zaledwie 3,6 kg, respirator ratunkowy jest zdecydowanie bardziej poręczny w porównaniu do poprzedniego modelu.

110 lat od rozpoczęcia seryjnej produkcji Pulmotora, naszego pierwszego respiratora ratunkowego, firma Dräger prezentuje: Oxylog VE300 – innowacja w czystej postaci.



PRAWDZIWA REWOLUCJA

Oxylog VE300 to więcej niż tylko nowy model respiratora ratunkowego. Łączy w sobie wszystkie funkcje niezbędne w przypadku pomocy doraźnej oraz w wentylacji ratunkowej – zarówno podczas transportu, jak i na terenie szpitala.

Do dyspozycji są: tryby wentylacji kontrolowanej objętościowo, wentylacja kontrolowana ciśnieniem oraz wentylacji nieinwazyjnej (NIV z CPAP), jak również oddechu spontanicznego i wspomagania ciśnieniowego (PS).

Dodatkowo, aby przejść w tryb RKO, wystarczy nacisnąć dedykowany przycisk. Wszystkie domyślne ustawienia automatycznie są dostosowane do międzynarodowych standardów ERC i AHA* – to zdecydowanie ułatwia pracę.

* ERC – European Resuscitation Council (Europejska Rada Resuscytacji), AHA – American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne).

Lekki w transporcie, szybkie rozpoczęcie wentylacji

PROSTY, ERGONOMICZNY, SOLIDNY I OSZCZĘDNY:

- Niezawodny nawet w ekstremalnych warunkach pracy (od -20°C do +50°C)
- Szybkie uruchomienie w trzech prostych krokach, które trwa nie dłużej niż 10 sekund
- Test urządzenia zajmuje mniej niż minutę
- Ustawienia domyślne, ułatwiające natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji
- Wymienny akumulator, który zapewnia do 9 godzin ciągłej pracy
- Niskie zużycie tlenu, dzięki technologii DuoFlow*
- Proste i zrozumiałe wskazówki obsługi oraz skrócony do minimum czas szkolenia
- Łatwy dostęp do dokumentacji (dane pacjenta, testy systemu, zrzuty ekranu), dzięki Bluetooth® i USB
- Mocowanie ściennie, ułatwiające wygodne pozycjonowanie
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie: pasek na ramię, mocowanie do noszy, torba na akcesoria, ładowarka
- Ergonomiczny uchwyt transportowy, umiejscowiony idealnie w środku ciężkości urządzenia



D-18354-2017

* Technologia DuoFlow: oparta na „Zasadzie Venturiego” bez dodatkowego przepływu podstawowego.

Czytelny, kolorowy ekran dotykowy

Dedykowany przycisk obrotu ekranu o 180°

Wentylacja kontrolowana objętościowo: VC-CMV / VC-AC, VC-SIMV

Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-BIPAP*

Wspomaganie oddechu spontanicznego: SPN-CPAP/PS z NIV

Wspomaganie ciśnieniowe (PS)

Tryb RKO dostępny bezpośrednio z ekranu głównego


Kapnografia: pomiar stężenia CO₂ w strumieniu głównym

Rejestr zdarzeń ułatwiający tworzenie niezbędnej dokumentacji



* Licencjonowany znak towarowy

Wsparcie i delikatność, których oczekujesz

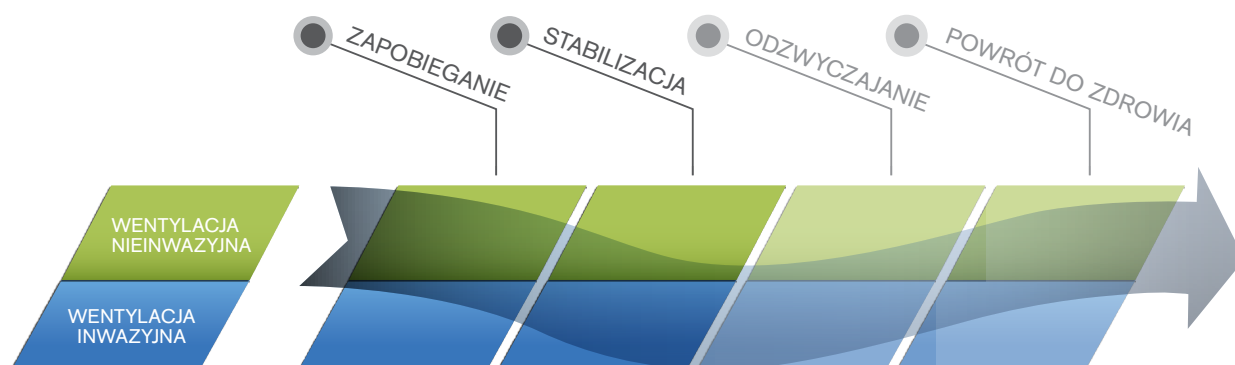

Oxylog® VE300 ułatwia prowadzenie terapii oddechowej w fazach zapobiegania i stabilizacji

ZAPOBIEGANIE

Wentylację nieinwazyjną, która w przypadku pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową daje dużo lepsze rezultaty, niż przy standardowym leczeniu, można także z powodzeniem prowadzić w warunkach pozaszpitalnych.*

- Właściwa synchronizacja z oddechem spontanicznym pacjenta zwiększa szanse powodzenia wentylacji nieinwazyjnej.
- Wentylacja nieinwazyjna, jako wstępny krok interwencyjny, może zapobiec pogorszeniu stanu pacjenta do czasu, kiedy intubacja jest konieczna.
- Tryb RKO monitoruje i ogranicza ciśnienie w drogach oddechowych do wartości domyślnych. Wdech nie jest przedwcześnie wstrzymywany dzięki odpowiednio dostosowanym granicom alarmowym.

STABILIZACJA

Niezawodna jakość wentylacji, która stabilizuje stan pacjenta:

- Tryby wentylacji kontrolowanej objętościowo VC-CMV / VC-AC oraz VC-SIMV
- Tryby wentylacji kontrolowanej ciśnieniem PC-BIPAP
- Wspomaganie oddechu spontanicznego w trybie SPN-CPAP/PS
- Wspomaganie ciśnieniowe (PS) w trybach wentylacji SPN-CPAP i VC-SIMV
- Wentylacja nieinwazyjna (NIV) z kompensacją przecieku w trybach wentylacji SPN-CPAP i SPN-CPAP/PS
- Urządzenie zapewnia minimalne stężenie tlenu wynoszące 40%
- Monitorowanie poziomu CO₂ pomaga ocenić poprawność intubacji i kontrolę procesu wentylacji

* Roessler, MS et al.: Early out-of-hospital non-invasive ventilation is superior to standard medical treatment in patients with acute respiratory failure: a pilot study, in: Emerg Med J. 2012;29(5):409-14

MT-0575-2007



AKCESORIA

Firma Dräger oferuje szeroki zakres dedykowanych akcesoriów do respiratora Oxylog® VE300. Maska pełnotwarzowa ClassicStar NIV została zaprojektowana do wentylacji nieinwazyjnej. Dzięki poduszce wypełnionej powietrzem, maskę można dopasowywać indywidualnie do twarzy pacjenta, zapewniając w ten sposób skuteczną terapię.

D-128-2017



AKADEMIA DRÄGER – PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT ODDYCHANIA I WENTYLACJI

Na czym dokładnie polega oddychanie? Co dzieje się, kiedy pacjent traci oddech i wymaga wentylacji? Program E-Learning firmy Dräger dostarcza odpowiedzi na te i inne pytania związane z oddychaniem oraz wentylacją.

D-32436-2011



DRÄGERSERVICE – PONIEWAŻ JAKOŚĆ MA ZNACZENIE

DrägerService® oferuje szeroki zakres usług serwisowych, które można dopasować do własnych potrzeb, począwszy od indywidualnego wsparcia technicznego, a skończywszy na kompleksowych kontraktach serwisowych. To odpowiedź na Twoje indywidualne potrzeby.

Oxylog® VE300 – prosta obsługa i mnogość rozwiązań w jednym kompaktowym urządzeniu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.draeger.com/oxylog

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

Producent:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeka, Niemcy

POLSKA

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

