



Oxivir Excel Foam

Preparat myjąco-dezynfekujący o szerokim spektrum działania, zalecany również do nieinwazyjnych urządzeń medycznych

Opis

Oxivir Excel Foam to gotowy do użycia preparat myjąco-dezynfekujący, w formie piany o szerokim spektrum działania oraz krótkich czasach kontaktu. Przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji wszystkich twardych, nieporowatych powierzchni w szpitalach, jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Zalecany jest również do nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Formuła produktu oparta jest na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru).

Cechy

- ✓ szerokie działanie biobójcze zapewnia najwyższy poziom ochrony pacjentów;
- ✓ krótki czas kontaktu pozwala utrzymać powierzchnie w pełni zwilżoną co wpływa na szybszą i bardziej efektywną penetrację zanieczyszczeń organicznych występujących na powierzchniach;
- ✓ nie zawiera substancji zapachowych i barwiących;
- ✓ nie wymaga spłukiwania;
- ✓ substancja aktywna (nadtlenek wodoru) rozkłada się na tlen i wodę i nie odkłada się na powierzchniach dzięki czemu nie dochodzi do narastania oporności bakterii;
- ✓ bezpieczny dla użytkownika-nie podrażnia dróg oddechowych;
- ✓ aplikowany w formie piany eliminuje wytwarzanie mgły aerozolowej;
- ✓ znakomite właściwości myjące, włącznie z odkamienianiem i zapobieganiem osadzaniu się kamienia dzięki czemu eliminuje się etap wstępnego czyszczenia;

Obszar zastosowania

- ✓ do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka w tym salach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej, na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych;
- ✓ do stosowania na powierzchnie takie jak podłogi, ściany, meble medyczne, sprzęt stanowiący wyposażenie sal, inkubatory, głowice USG, wózki szpitalne, wyposażenie łazienek, wanny, brodziki, nocniki, plastikowe pojemniki oraz inne (w tym wykonane z wrażliwych na alkohol materiałów jak np. szkło, guma czy tworzywa sztuczne);

**Skuteczny wg
normy 16615w**





Oxivir Excel Foam

Sposób użycia

Pianowe mycie i dezynfekcja

1. Natrysnąć preparat na ściereczkę i przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię albo nanieść bezpośrednio na powierzchnię za pomocą spryskiwacza; upewnić się, że cała powierzchnia jest dobrze zwilżona;
2. Upewnić się, aby powierzchnia pozostała wilgotna przez zalecany czas kontaktu;
3. Po upływie czasu zalecanego kontaktu wytrzeć do sucha albo pozostawić do wyschnięcia, nie wymaga spłukiwania.



Skuteczność mikrobójcza

działanie	EN test	czas kontaktu
		warunki brudne
bakteriobójcze, w tym: MRSA, VISA, VRSA, VRE	EN13727	30 sek
	EN13697	5 min
	EN16615	1 min
grzybobójcze, w tym: <i>Candida albicans</i>	EN13624	5 min
	EN13697	5 min
	EN16615	1 min
wirusobójcze, w tym: adenowirus, rotawirus, poliwirus, norowirus, MNV, wirus RSV (wirus syncytialny), HBV, HCV, HSV, HIV, H1N1	EN14476	30 sek

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir Excel Foam, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Kompatybilność materiałowa

Używany zgodnie z zaleceniami producenta Oxivir Excel Foam jest odpowiedni do użycia na większości powierzchni.

Skład preparatu

natlenek wodoru (3,6 g/kg), anionowe środki powierzchniowoczystne (<5%)

Dane techniczne

wygląd:	przezroczysta ciecz
gęstość względna [20° C]:	1.0001 g/cm ³
pH-roztworu:	< 2.0 (nierozcieńczony)
zapach:	neutralny

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Certyfikaty i atesty

Wyrób Medyczny kl. IIa.

Pozwolenie Urzędu Rejestracji PL, WM i PB na obrót produktem biobójczym nr 6850/17.

Informacja środowiskowa

Środki powierzchniowo czynne stosowane w tym produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów UE, WE648/2004.

Opakowanie handlowe

Oxivir Excel Foam 6 x 750 ml

W linii produktów Oxivir Excel dostępne są również:

Oxivir Excel 2 x 5L

Oxivir Excel Wlpe 12 x 100 pc

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do zamarzania. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny. Wchodzi w reakcję z alkaliom.