

PLIWA® BIG AF



Koncentrat środka do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych oraz inwentarza szpitalnego.

Wysoka zgodność materiałowa z powierzchniami akryłowymi, tworzywami sztucznymi wrażliwymi na chemikalia i alkohole

Bezaldehydowa formuła czyni preparat bezpiecznym podczas stosowania we wszystkich obszarach szpitalnych. Po wyschnięciu nie pozostawia zacieków. Przyjemny i przemijający zapach. Aktywny na szczepy antybiotykooporne, w tym MRSA.

Skład preparatu

100 g koncentratu zawiera substancje czynne: alkydimetylbenzylammoniumchlorid
cocospropylendiamin-1,5-bis-guanidinacetat
1,3-propandiamin
N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W ROZTWORACH !

Badania wg DGHM	5	15	30	Badania wg zaleceń RKI 2005	5	30
	min.				min.	
w ograniczonym obciążeniu organicznym				wirusobójczość BVDV Vaccinia, HBV, HCV, HIV (w ograniczonym obciążeniu) Vaccinia, HBV, HCV, HIV (w wysokim obciążeniu)		
bakteriobójczość (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, P. mirabilis, E. coli)					0,5%	
prątkobójczość (M. terrae)	1%	0,75%	0,5%		0,5%	1%
grzybobójczość (C. albicans)						

Przeznaczenie

BIG AF jest preparatem do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych: wanien w obrębie oddziałów klinicznych i terapeutycznych, łóżek, materacy, nocnych stolików, stołów operacyjnych, foteli zabiegowych, inkubatorów, mebli medycznych oraz ścian i podłóg w zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, domach pomocy społecznej. Preparat ten posiada potwierdzoną zgodność materiałową z powierzchniami akryłowymi, zatem szczególnie odpowiedni jest do dezynfekcji i czyszczenia akrylowo-szklanych powierzchni, np.: wanny akrylowe, osłony z pleksi, szkło akrylowe i organiczne, łóżka, pokrowce na łóżka, stoliki przyłóżkowe, stoły operacyjne, obudowa aparatury medycznej oraz wszechstronnie w solariach i zakładach rehabilitacyjnych oraz powierzchniach mających kontakt z żywnością.¹

Zastosowanie

Stosować roztwór roboczy w stężeniu odpowiednim do wybranego czasu ekspozycji. Do przygotowania roztworów sugeruje się stosowanie urządzeń dozujących, zapewniających uzyskanie wskazanych stężeń, tym butelek o poj. 1 litra z dozownikiem. W przypadku dezynfekcji przedmiotów zanurzonych lub wypełnionych roztworem należy zwrócić uwagę na dokładne zanurzenie przedmiotów w roztworze lub wypełnienie roztworem (usunięcie pęcherzy powietrza). Dezynfekowane powierzchnie myć przy pomocy ścierek, mopów lub mechanicznych urządzeń myjących. Po procesie dezynfekcji nie wymaga się spłukiwania powierzchni, wietrzenia pomieszczenia itp.

Właściwości

odczyn pH (20°C) roztworu – ok. 10

Ostrzeżenia

Produkt żrący. Powoduje oparzenia. Przechowywać pod zamknięciem - Chronić przed dziećmi. Nie wdychać par / aerozoli. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczuje, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Trwałość preparatu przechowywanego w temperaturze pokojowej - 5 lat.
Certyfikacja producenta EN ISO 9001 / EN ISO 13485, CE 0124



Producent:

L.C. PLIWA®

D-34323 Malsfeld-Ostheim, Pliwa-Straße 2
tel. +49 5661-7317-0, fax +49 5661-7317-10
e-mail: info@pliwa.de, www.pliwa.de

Dystrybutor:

DEZYMED® Jodko i wsp. Sp. j.

Biuro handlowe:
ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec
tel. 89 7154532, fax 89 7152362
e-mail: biuro@dezymed.pl, www.dezymed.pl

PLIWA[®] BIG AF



Sposób pakowania do dostawy

karton z 12 butelkami	o poj. 1 l
karton z 10 butelkami	o poj. 2 l
karton z 2 kanistrami	o poj. 5 l
kanistry	o poj. 10 l

¹ Szczególnie w tych obszarach praktyczne zastosowanie znajduje gotowy do użytku roztwór BIG AF pod nazwą handlową BIG AF Kombi Pack który może być stosowany przez przecieranie lub spryskiwanie pianą. BIG AF Kombi Pack stanowi korzystną alternatywę do alkoholowych, szybko działających preparatów.

Ekspertyzy potwierdzające:

Prof. Dr. med. hab. Axel Kramer, Greifswald:

- opinia z dnia 03.08.2004 r. do dezynfekcji powierzchni wg Stand. Metod DGHM stan. 01.09.2001 r.;

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Bischofshofen:

- opinia z dn. 30.07.2004 r. środka do dezynfekcji powierzchni (DGHM);
- raport z badania z dn. 16.02.2005 r. o skuteczności wobec S. aureus (MRSA) izolatu klinicznego;

Dr. Jochen Steinmann, Bremen:

- opinia z dn. 07.10.2004 r. o skuteczności wobec wirusa BVDV;
- opinia z dn. 23.01.2005 r. o skuteczności wobec wirusa Vaccinia wg aktualnych wytycznych RKI.

Rejestracje:

- Rejestracja wyrobu medycznego UMDNS 17920;
- Certyfikat CE nr z dn. DEKRA 0124
- Certyfikat VAH nr N8/172 z dn. 03.11.2008 r.

Pochodne produkty:

PLIWA[®] BIG AF Kombi Pack – zestaw do przygotowania chusteczek czyszcząco-dezynfekcyjnych oraz piany czyszcząco-dezynfekcyjnej.