

PLIWA® LEMON FRESH AF



Alkoholowy gotowy do stosowania preparat
do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych,
karetek oraz miejsc trudnodostępnych.

**Szerokie spektrum działania już
w 30 sekundowym czasie ekspozycji!**

Nie zawiera aldehydu i fenolu

Bezaldehydowa formuła czyni preparat bezpiecznym podczas stosowania we wszystkich obszarach szpitalnych. Po wyschnięciu nie pozostawia zacieków. Przyjemny i przemijający zapach. Aktywny na szczepy antybiotykooporne, w tym MRSA.

Skład preparatu

100 g koncentratu zawiera substancje czynne: 33,66 g etanol
15,84 g 2-propanol
0,05 g N.N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid

Zakres skuteczności

Badania wg EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650	Badania wg zaleceń RKI 2004 r., EN 14476
w wysokim i ograniczonym obciążeniu organicznym	wirusobójczość
bakteriobójczość (<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>P. mirabilis</i> , <i>E. coli</i>) – 30 sek.	HCV(BVDV), Vaccinia – 30 sek.
mykobakteriobójczość (<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i>) – 1 min.	HBV (ograniczone obciążenie) – 1 min.
grzybobójczość (<i>C. albicans</i> , <i>A. niger</i>) – 30 sek.	HBV (wysokie obciążenie) – 3 min.
	SARS – 30 sek.
	Rota (faza 2 etap 2) – 1 min.
	Adeno (faza 2 etap 2) – 5 min.

Przeznaczenie

Preparat przygotowany według najwyższych technologii służy do miejscowej szybkiej dezynfekcji niewielkich, trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych i sprzętów, których dezynfekcja jest utrudniona, a w szczególności: w salach operacyjnych, gabinetach stomatologicznych oraz lekarskich, stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach fizykoterapii, gabinetach kosmetycznych, np.:

- do dezynfekcji foteli zabiegowych, stomatologicznych, ginekologicznych i ich osprzętu, kozetek i łóżek medycznych (również w stacjach łóżek) oraz pozostałego wyposażenia gabinetów i sal;
- do dezynfekcji innego ruchomego inwentarza, a szczególnie wnętrza i wyposażenia karetek pogotowia i medycznych środków transportu;
- do dezynfekcji pokrowców na materace, poduszki i przykrycia;
- do dezynfekcji odzieży i obuwia operacyjnego;
- do dezynfekcji stanowisk w laboratoriach, pracowniach;
- do dezynfekcji wózków transportowych, klamek, wnętrza szafek, pojemników, stolików do przewijania niemowląt;
- do dezynfekcji medycznego sprzętu elektronicznego.

Preparat może być stosowany do dezynfekcji elementów z tworzyw sztucznych i lakierowanych odpornych na alkohol. W przypadkach wątpliwych należy wykonać próbę.

Zastosowanie

Dezynfekowane powierzchnie (przedmioty) spryskiwać z odległości ok. 20 – 30 cm do całkowitego zwilżenia, pozostawić do wyschnięcia lub przetrzeć. Preparat pozostawić na zwilżonej powierzchni przez 1-5 min. Najlepszą skuteczność uzyskuje się przy użyciu ok. 15 - 20 ml na 1 m². Ze względów ekonomicznych i bezpieczeństwa nie zaleca się dezynfekcji dużych powierzchni. Po czasie ekspozycji nadmiar preparatu można zetrzeć chusteczką jednorazową. Przy dezynfekcji przedmiotów, które można zamoczyć w płynie należy zwrócić uwagę na wypełnienie przestrzeni preparatem. Sprzęt elektryczny przed procesem dezynfekcji wyłączyć i może zostać uruchomiony ponownie, po wyschnięciu.

Ostrzeżenia

Produkt łatwopalny. Chronić przed dziećmi. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie wdychać pary, aerozolu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Trwałość preparatu przechowywanego w temperaturze pokojowej - 5 lat.

Certyfikacja producenta EN ISO 9001 / EN ISO 13485, CE 0124, VAH

Sposób pakowania do dostawy	karton z 15 pojemnikami*	o poj. 1000 ml
	karton z 15 pojemnikami	o poj. 1000 ml
	kanister	o poj. 5 l
	kanister	o poj. 10 l

* Do butelek o pojemności 1000 ml załączone atomizery.



Producent:

L.C. PLIWA®

D-34323 Malsfeld-Ostheim, Pliwa-Straße 2
tel. +49 5661-7317-0, fax +49 5661-7317-10
e-mail: info@pliwa.de, www.pliwa.de

Dystrybutor:

DEZYMED® Jodko i wsp. Sp. j.

Biuro handlowe:
ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec
tel. 89 7154532, fax 89 7152362
e-mail: biuro@dezymed.pl, www.dezymed.pl

PLIWA® LEMON FRESH AF



Ekspertyzy potwierdzające:

Dr. Jochen Steinmann, Bremen:

- opinia i raport z badania z dn. 23.08.2001 r. o skuteczności wobec wirusów (HBV / HIV);
- opinia z dn. 22.09.2007 r. o skuteczności wobec wirusa Adeno typ 5 (wg normy EN 14476) w ograniczonym obciążeniu;
- opinia z dn. 10.09.2008 r. o skuteczności wobec wirusa ludzkiego Rota Stamm Wa (wg normy EN 14476) w ograniczonym obciążeniu;
- opinia z dn. 20.11.2009 r. o skuteczności wobec wirusa Vaccinia, BVDV;

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin:

- opinia z dn. 02.10.2001 r. środka do dezynfekcji powierzchni (DGHM);
- raport z badania z dn. 08.10.2001 r. o skuteczności na Mycobacterium terrae + opinia z dn. 19.01.2004 r. do Tbc z dn. 08.10.2001 r.;
- opinia z dn. 08.08.2005 r. i raport z badania z dn. 06.06.2005 r. o skuteczności bakterio-, drożdżakobójczej (C. albicans) w wysokim obciążeniu;
- opinia z dn. 26.07.2005 r. i raport z badania z dn. 25.07.2005 o skuteczności tuberkulozobójczej (Tbc);
- raport z badania z dn. 29.11.2005 r. o skuteczności wobec S. aureus (MRSA) w wysokim obciążeniu;
- opinia z dn. 04.05.2007 r. o skuteczności grzybobójczej (A. niger) (wg normy EN 13624 – faza 2, etap 1) w wysokim obciążeniu;
- opinia z dn. 27.06.2007 r. o skuteczności bakteriobójczej (wg normy EN 13727 – faza 2, etap 1);
- raport z badania z dn. 09.03.2007 r. o skuteczności bakterio- i drożdżakobójczej wg Stand. Metody DGHM stan. 01.09.2001 r. dla wszystkich wersji zapachowych;
- opinia i raport z dn. 24.07.2007 r. o skuteczności bakteriobójczej wg normy EN 1275;
- opinia i raport z dn. 25.07.2007 r. o skuteczności grzybobójczej wg normy EN 1650;
- raport z badania z dn. 10.10.2007 r. o skuteczności prątkobójczej (M. terrae) wg Stand. Metod DGHM stan. 01.09.2001 r. dla wszystkich wersji zapachowych;

Dr. med. hab. Georg Schrader, Weimar:

- opinia z dn. 20.06.2005 r. wg Stand. Metod DGHM;
- raport z badania z dn. 13.06.2005 r. zgodnie z EN 14348;
- opinia z dn. 17.08.2005 r. i raport z badań z dn. 15.08.2005 r. o skuteczności prątkobójczej i mykobakteriobójczej (M. terrae, M. avium);
- opinia z dnia 30.06.2005 r. o skuteczności mykobakteriobójczej (M. terrae + M. avium);

Institut Dr. agr. Fäber, Giessen:

- opinia z dn. 30.11.2001 o właściwości stosowania preparatu do dezynfekcji powierzchni w profilaktyce szpitalnej;

Dr. dent. Wolfgang Eichenhofer, Spangenberg:

- opinia kliniczna z dn. 10.03.2008 r.

Rejestracje:

- Rejestracja wyrobu medycznego UMDNS 17-920;
- Certyfikat CE nr z dn. DEKRA 0124
- Certyfikat VAH nr N8/173 z dn. 11.12.2008 r.;
- Certyfikat nr N-35508 rejestracji produktu biobójczego w BAuA(Federalny Urząd Ochrony i Medycyny Pracy).

Pochodne produkty:

PLIWA® LEMON FRESH TÜCHER AF – pudełka zawierające po 90 / 120 / 200 szt. chusteczek;

PLIWA® LEMON FRESH TÜCHER AF – wkłady zawierające po 90 / 120 / 200 szt. chusteczek;

PLIWA® Quick + Clean Wipes – zestaw z ręcznikami o wym. 30 x 30 cm w pudełkach po 70 / 90 szt. i worek o poj. 1,5 l / 2,0 l z preparatem;

PLIWA® Quick + Clean Wipes – wkład z ręcznikami o wym. 30 x 30 cm w pakietach po 70 / 90 szt. i worek o poj. 1,5 l / 2,0 l z preparatem.