

Etykiety samoklejące

dokumentacja obiegu narzędzi

opis produktu

Stosowanie systemu etykietowania i archiwizacji zapewnia dostęp do pełnej informacji na temat każdego etapu procesu dezynfekcji i sterylizacji wyrobu medycznego. Ten prosty i kompletny system składa się z metkownic trzyczęściowych, kopert do archiwizacji oraz specjalnych etykiet dwukrotnie przylepnych ze wskaźnikami STEAM, EO, FORM oraz PLAZMA.

Metkownica alfanumeryczna umożliwia wydruk informacji w trzech wierszach po 12 znaków w każdym wierszu.

Etykiety trzywierszowe ze wskaźnikami STEAM, EO, FORM wykonane są ze specjalnego papieru o gramaturze 74g/m², etykieta ze wskaźnikiem PLAZMA wykonana jest z materiału typu TYVEK o gramaturze 55g/m².

Specjalna warstwa kleju daje możliwość łatwego i bezpiecznego naklejania etykiety na dowolny sterylizowany pakiet, a druga warstwa klejąca ułatwia wklejenie etykiety do koperty archiwizującej lub na kartę pacjenta.

Na każdej etykiecie umieszczona jest m. in. informacja o kolorze przebarwienia testu oraz klasie, jaką spełnia wskaźnik wg normy PN EN ISO 11140-1.

Naklejki ze wskaźnikiem parowym występują w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i szarym.

Koperty do archiwizacji w formacie C4 występują z nadrukiem w wersji standard lub mogą być wykonane dla klienta wg indywidualnego projektu.

sposób użycia i odczyt wyników

Na przygotowane pakiety należy za pomocą metkownicy nakleić etykietę, na której zapisane mogą być informacje takie jak: data sterylizacji i ważności pakietu, numer sterylizatora, numer kolejnego wsadu, inicjały osoby odpowiedzialnej za wykonany pakiet, zawartość pakietu lub dane procesu dezynfekcji (kodowane cyfrowo).

Bezpośrednio przed użyciem wysterylizowanego zestawu należy przekleić poprawnie przebarwioną etykietkę do przeznaczonego systemu dokumentacji lub karty pacjenta.


Etykietę kontrolną należy po procesie sterylizacji nakleić na kopertę archiwizacyjną.

obszary zastosowań

Metkownice dwu i trzyczęściowe różnych producentów: Blitz, GKE, Monarch®, Famos.



wymiary: 25x31mm

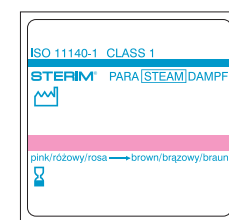

wymiary: 29x28mm

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
PN EN ISO 11140-1 klasa 1 EN 13485 EN 980	Przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze 10-35 °C i wilgotności: 20-80% Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji.	Bez wskaźnika, kolorowe 604.112.9000: rolka 750 etykiet/ opak. 12 rolek STEAM, kolorowe 603.211.9000: rolka 750 etykiet/ opak. 12 rolek PLAZMA 603.220.9000: rolka 500 etykiet/ opak. 12 rolek FORM 603.240.9000: rolka 750 etykiet/ opak. 12 rolek EO 603.230.9000: rolka 750 etykiet/ opak. 12 rolek Metkownica trzyczęściowa 603.003.0001: opak. 1 szt. Pełna oferta etykiet dostępna w Dziale Handlowym.