

Jednorazowe suche chusty DESCO WIPES do stosowania z dozownikiem i środkiem dezynfekującym

- Jednorazowe nietkane suche chusty do stosowania z dowolnymi środkami myjąco- dezynfekującymi
- Dozownik - wiaderko wielokrotnego użytku
- Doskonałe rozwiązanie dla środka dezynfekującego



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Suche chusty Desco Wipes po przygotowaniu do użycia służą do szybkiego i łatwego mycia oraz dezynfekcji wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowego nietkanego materiału. Chusty charakteryzują się dużą chłonnością.

Desco Wipes mogą być stosowane w połączeniu z dowolnymi środkami gotowymi do użycia jak również roztworami roboczymi przygotowanymi z koncentratów dezynfekujących.

System suchych, jednorazowych chusteczek Desco Wipes wraz z dozownikiem po przygotowaniu stanowi doskonałe, innowacyjne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Materiał nietkany, z którego wykonane są chusty gwarantuje równomierne nawilżenie powierzchni środkiem dezynfekującym.

Chusteczki Desco Wipes aplikowane są z wiaderka dozującego poprzez przeciągnięcie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu. Rozwiązanie to gwarantuje zabezpieczenie roztworu roboczego przed zanieczyszczeniami i parowaniem.

DOZOWNIK DO CHUSTECZEK DESCO WIPES

Specjalnie zaprojektowany dozownik - wiaderko do higienicznego i łatwego dozowania jednorazowych chust Desco Wipes wykonane jest z polietylenu i polipropylenu. Po przygotowaniu systemu do użycia (patrz sposób użycia) chusty Desco Wipes wyciąga się z pojemnika przez specjalny otwór dozujący, który posiada możliwość ponownego zamknięcia. Dozownik można myć w zmywarce do naczyń w temp. do 60°C. Na specjalnej etykiecie informacyjnej dla użytkownika ułatwiającej dokumentację przygotowanej partii można zamieścić numer seryjny środka dezynfekującego, datę sporządzenia roztworu roboczego oraz datę terminu ważności.

DANE TECHNICZNE

Chusteczki Desco Wipes są dostępne w rolkach po 70 chusteczek o wymiarach: 25 x 25 cm oraz w rolkach po 100 chusteczek o wymiarach: 32 x 30 cm. Chusteczki wykonane są z wysokiej jakości, nie pozostawiającego klaczków nietkanego materiału. Chusteczki Desco Wipes wykonane są w 100% z mieszanych włókien syntetycznych - poliester. Chusty o gramaturze 40g/m². Wiaderka wykonane z polietylenu i polipropylenu.

SPOSÓB UŻYCIA

Sporządzić 2,5 – 3 litrów (w przypadku wkładów 100 szt.) lub 1,0 - 1,5 litrów (w przypadku wkładu 70 szt.) roztworu roboczego środka myjącego lub dezynfekującego zgodnie z informacjami podanymi przez producenta preparatu w instrukcji użytkowania. Jednorazowe, suche chusteczki Desco Wipes należy wyciągnąć z folii i włożyć do dozownika – wiaderka. Następnie zalać (przygotowanym roztworem roboczym lub preparatem gotowym do użycia) chusty i poczekać do ich pełnego nasiąknięcia od 30 do 60 minut. Chusty są gotowe do użycia po ich całkowitym nasączeniu. Chusty należy wyciągać pojedynczo jedna po drugiej. Każda następna chusta chroniona jest przed wyschnięciem przez zamknięcie otworu dozującego.

Należy przestrzegać długości czasu ekspozycji podanego przez producenta środka dezynfekującego / myjącego.

Stabilność roztworów wszystkich produktów Dr. Schumacher przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni została przetestowana w stężeniach zalecanych przez DGHM. Przetestowano również alkoholowe środki gotowe do użycia. W przypadku wszystkich produktów Dr. Schumacher okres przydatności do użycia wynosi co najmniej 28 dni.

ZASTOSOWANIE

System suchych, jednorazowych chust Desco Wipes wraz z dozownikiem po zalaniu środkiem dezynfekcyjnym/myjącym służą do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz wszelkich powierzchni w placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, gabinetach lekarskich, a także we wszystkich obszarach przemysłu farmaceutycznego i laboratoriach, jak również w przemyśle spożywczym i stołówkach.

System ten polecany jest szczególnie do:

- powierzchni wyrobów medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentem jak np. stoliki nocne i nosze
- blatów roboczych
- obszarów użytkowych, w których nie ma przyłączy wodociagowych, lub w których higieniczne oczyszczanie powierzchni nie jest możliwe
- powierzchni trudno dostępnych.



Sposób przygotowania suchych chusteczek Desco Wipes wraz z dozownikiem do użycia



EKSPERTYZY

Dr. Brill, higienista, Hamburg: Badania dotyczące stabilności mikrobiologicznej preparatów Cleanisept, Biguanid Fläche N, Descosept AF, Descosept Pur, Optisal N użytych w systemie Desco Wipes.

Ekspertyzy dot. dezynfekcji powierzchni chustami Desco Wipes nasączonymi preparatami Cleanisept i Biguanid Fläche N, test praktyczny.

Dr. Wecker, Dr. Schumacher, Melsungen: Przydatność włókny, z której wykonane są chusteczki Desco Wipes do dezynfekcji powierzchni.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld

REJESTRACJA

Suche chusteczki Desco Wipes są zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EC.

Dozownik – wiaderko do suchych chusteczek Desco Wipes nie podlega rejestracji. Jest to wyrób niemedyyczny.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr katalogowy
Desco Wipes - 100 szt. chusteczek w rolce	6 x 1 rolka	915006-100S
Desco Wipes - 70 szt. chusteczek w rolce	3 x 1 rolka	915007-070S
Dozownik – wiaderko duże do chusteczek Desco Wipes	1 x 1 wiadro	915016-001S
Dozownik – wiaderko małe do chusteczek Desco Wipes	1 x 1 wiadro	915017-001S




PRZECHOWYWANIE

Suche chusty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym chusty, przechowywać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta środka nasączającego.

AKCESORIA

Uchwyt na wiaderko do mocowania na ścianie.

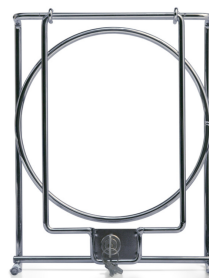

Różnokolorowe pokrywki dozowników - wiader, które ułatwiają stosowanie systemów w różnych działach lub mogą służyć do rozróżnienia systemów napełnionych różnymi preparatami.